

BioDil RET

retikulocita puffer automatizált hematológiai vizsgálatokhoz

Készítmény kód: **D021** 1 L

Kizárólag *in vitro* diagnosztikai vizsgálatok céljára!

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

A BioDil RET retikulocita puffer pufferelt, stabilizált és mikroszűrt elektrolit oldat humán vérminták automatizált hígítására, retikulociták (RET) és trombociták (PLT) mennyiségi meghatározására Sysmex XE-2100, XE-5000, XT-1800i, XT-2000i, XT-4000i hematológiai analizátorokon.

A BioDil RET retikulocita puffer csak a megfelelő BioXol gyártású reagensekkel együtt alkalmazva garantálja a helyes vizsgálati eredményeket. Más gyártók reagenseinek használata hibás eredményekhez vezethet.

A további lényeges információk megtalálhatók a készülék Felhasználói Kézikönyvében..

A KÉSZÍTMÉNY ÖSSZETEVŐI

Felületaktív anyagok.....	< 0,4 %
Pufferek	< 1,8 %
Stabilizátorok	< 0,8 %
Tartósítószerke.....	< 0,5 %
ionmentes vízben	

FIGYELMEZTETÉSEK

- BioDil RET retikulocita puffer környezetbarát, azid-mentes reagens; nem tartalmaz veszélyes összetevőket.
- A reagens nem kerülhet szembe, bőrre vagy ruhára.
- A szembe kerülő reagenst bő vízzel kell kimosni több percen át. A bőrre jutó reagenst vízzel kell lemosni.
- A használatban nem lévő tárolóedényt zárva kell tartani.
- A reagens használata során védőkesztyűt kell viselni.
- Minden levett testfolyadék minta potenciálisan fertőző anyagnak tekintendő. Az összes vérmintát és minden más, potenciálisan fertőző anyagmintát csak megfelelő óvintézkedések mellett szabad kezelni. A minták használata során védőkesztyű, maszk és köpeny viselése kötelező.
- Kérjük, tanulmányozza a reagens biztonságtechnikai adatlapját (MSDS).
- A reagensek alkalmazása során a helyes laboratóriumi gyakorlatot (GLP) kell követni.

MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

A BioDil RET reagens EDTA antikoagulánsra levett vénás vér vizsgálatára szolgál. A hematológiai minták a mintavétel után 15-30°C-on tárolva 8 órán belül, hűtőszekrényben (2-8°C) tartva 24 órán belül használhatók fel vizsgálatra.

ELŐKÉSZÍTÉS

- A reagens felhasználásra kész; különleges előkészítés nélkül felhasználható közvetlenül a tárolóedényből.

A reagenst felhasználás előtt hagyni kell felmelegedni szobahőmérsékletre.

REAGENS CSERE MÓDJA

- A reagensek cseréjét csak megfelelően képzett laboratóriumi szakember végezheti.
- Távolítsa el a kicserélendő reagens tárolóedényének zárókupakját. Csatlakoztassa a készülék felszívócsővét az új reagens tárolóedényéhez.
- Győződjön meg róla, hogy a csővezetéseken, a reagens tárolóedények címkéjén és a készülék csatlakozóján lévő színjelölések összeillenek.
- El kell kerülni el a csővezetékek és reagensek mikrobiológiai és por szennyeződését. Tárolóedényben maradó reagenst nem szabad másik tárolóedénybe önteni és elegyíteni.
- Az új reagenst alaposan fel kell szívatni és háttér értékeket kell mérni.
- Új gyártási számú reagens felszívását követően a készüléket a Felhasználói Kézikönyvben leírt módon újra kell kalibrálni.

TÁROLÁS, STABILITÁS ÉS ELTÁVOLÍTÁS

- A BioDil RET retikulocita puffer +2 és +35°C között tárolandó.
- A BioDil RET reagens lejáratási ideje a gyártástól számított 2 év, ha a készítményt az előírt hőmérséklet tartományban tartják.
- A készítmény nem használható fel a tárolóedényen lévő címkére nyomtatott lejáratási időn túl.
- A felnyitott tárolóedényben lévő reagens alkalmazhatósági ideje 3 hónap.
- A megfagyott reagens nem használható fel felolvadás után.
- A hulladékot és a fel nem használt reagenst a hatályos hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell kezelni.

GYÁRTÓ

BioXol Kft.
Budapest
Email: hemat@bioxol.com

Verziószám 1.0