

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

BioStain W5P

fluoreszcens WBC-5-diff festék automatizált hematológiai vizsgálatokhoz

Készítmény kód: **S028** 42 mL

Kizárólag *in vitro* diagnosztikai vizsgálatok céljára!

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

A BioStain W5P fluoreszcens WBC-5-diff festék felhasználásra kész fluoreszcens festék-reagens eukociták (WBC) mennyiségi meghatározására és 5 mérettartományra (LYM, MONO, NEU, EO, BA) történő differenciálására Sysmex XE-2100, XE-5000, XT-1800i, XT-2000i, XT-4000i, XS-800i, XS-1000i hematológiai analízátorokon.

A BioStain W5P fluoreszcens WBC-5-diff festék csak a megfelelő BioXol gyártású reagensekkel együtt alkalmazva garantálja a helyes vizsgálati eredményeket. Más gyártók reagenseinek használata hibás eredményekhez vezethet.

A további lényeges információk megtalálhatók a készülék Felhasználói Kézikönyvében..

A KÉSZÍTMÉNY ÖSSZETEVŐI

Festék < 1,5 %
Stabilizátorok < 99,0 %

FIGYELMEZTETÉSEK

- BioStain W5P fluoreszcens WBC-5-diff festék környezetbarát reagens.
- A reagens nem kerülhet szembe, bőrre vagy ruhára.
- A szembe kerülő reagenst bő vízzel kell kimosni több percen át. A bőrre jutó reagenst vízzel kell lemosni.
- A használatban nem lévő tárolóedényt zárva kell tartani.
- A reagens használata során védőkesztyűt kell viselni.
- Minden levett testfolyadék minta potenciálisan fertőző anyagnak tekintendő. Az összes vérmintát és minden más, potenciálisan fertőző anyagmintát csak megfelelő óvintézkedések mellett szabad kezelni. A minták használata során védőkesztyű, maszk és köpeny viselése kötelező.
- Kérjük, tanulmányozza a reagens biztonságtechnikai adatlapját (MSDS).
- A reagensek alkalmazása során a helyes laboratóriumi gyakorlatot (GLP) kell követni.

MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

A BioStain W5P reagens EDTA antikoagulánsra levett vénás vér vizsgálatára szolgál. A hematológiai minták a mintavétel után 15-30°C-on tárolva 8 órán belül, hűtőszekrényben (2-8°C) tartva 24 órán belül használhatók fel vizsgálatra.

ELŐKÉSZÍTÉS

- A reagens felhasználásra kész; különleges előkészítés nélkül felhasználható közvetlenül a tárolóedényből.

A reagenst felhasználás előtt hagyni kell felmelegedni szobahőmérsékletre.

REAGENS ALKALMAZÁS MÓDJA

- A reagensek cseréjét csak megfelelően képzett laboratóriumi szakember végezheti.
- Távolítsa el a kicserélendő reagens tárolóedényének zárókupakját. Csatlakoztassa a készülék felszívócsövét az új reagens tárolóedényéhez.
- Győződjön meg róla, hogy a reagenst a megfelelő csővezetékre csatlakoztatta.
- El kell kerülni el a csővezetékek és reagensek mikrobiológiai és por szennyeződését. Tárolóedényben maradó reagenst nem szabad másik tárolóedénybe önteni és elegyíteni.
- Az új reagenst alaposan fel kell szívatni és háttér értékeket kell mérni.
- Az új reagenst alaposan fel kell szívatni és háttér értékeket kell mérni.

TÁROLÁS, STABILITÁS ÉS ELTÁVOLÍTÁS

- A BioStain W5P fluoreszcens WBC-5-diff festék +2 és +35°C között tárolandó.
- A BioStain W5P reagens lejáratí ideje a gyártástól számított 2 év, ha a készítményt az előírt hőmérséklet tartományban tartják.
- A készítmény nem használható fel a tárolóedényen lévő címkére nyomtatott lejáratí időn túl.
- A felnyitott tárolóedényben lévő reagens alkalmazhatósági ideje 3 hónap.
- A megfagyott reagens nem használható fel felolvadás után.
- A hulladékot és a fel nem használt reagenst a hatályos hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell kezelni.

GYÁRTÓ

BioXol Kft.
Budapest
Email: hemat@bioxol.com

Verziószám 1.0